

A colheita de sangue com S-Monovette®

A solução ideal para resultados perfeitos

1 Preparação

Colar a etiqueta com o código de barras

Linha do código de barras

Desinfetar de acordo com as normas internas da instituição

Garrotagem <1 min

Desinfecção

Colocar o garrote alguns centímetros acima do local de punção

Respeitar a ordem de colheita (Código de cores Europeu)

Hemocultura

Soro/Soro-Gel^{1a} OU Citrato^{1b,2}

Heparina/Heparina-Gel

EDTA

Fluoreto/Citrato-Fluoreto

2 Colheita de sangue

Princípio de aspiração – A técnica que privilegia o conforto do paciente

Antes da punção "avisar" o paciente

Click

Princípio de vácuo³ – Sempre um "vácuo fresco"

Antes da punção "avisar" o paciente

Click

3 Manuseamento de amostras e eliminação de desperdícios

Assegurar o CORRETO enchimento para resultados exatos

Citrato VS Heparina VS EDTA VS Citrato-Fluoreto

Homogeneizar bem as amostras invertendo suavemente as S-Monovette®

Citrato VS Heparina VS EDTA VS Citrato-Fluoreto VS CPDA₁ VS CTAD

Assegurar o correto armazenamento

Após a colheita armazenar a S-Monovette® Soro/Soro Gel numa posição vertical durante 30 minutos.

Click⁴

644b-6021 Este panfleto poderá conter informações sobre produtos que não se encontram disponíveis em alguns países. Modificações técnicas reservadas.

^{1a} Gurr et al "Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik" J Lab Med 2011

^{1b} Recomendação de acordo com a norma CLSI standard H3-A6(GP 41-A6): „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition.“

² Recomenda-se colher um primeiro tubo e descartá-lo quando o tubo de citrato for o primeiro a ser colhido.

³ Para iniciar a colheita de sangue de forma confortável para o paciente, recomenda-se a utilização da primeira S-Monovette® com o método de aspiração. Depois, continuar com o método de vácuo.

⁴ Também poderá ativar o protetor de agulha utilizando o dedo indicador. Para um processo seguro, assegure que pressiona contra a extremidade inferior do dispositivo de proteção.

Ter em atenção que as questões aqui abordadas („Colheita de Sangue com a S-Monovette“) são meramente indicativas e não substituem, sob qualquer circunstância, indicações médicas, científicas ou tecnológicas

www.sarstedt.com • info.pt@sarstedt.com

SARSTEDT