


Důležité pokyny k manipulaci

Monovette® na krevní plyny


1

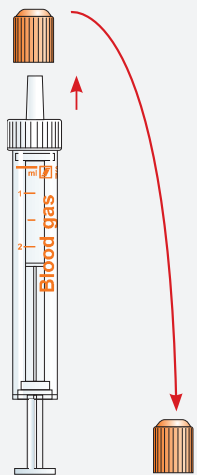

Sejměte z Monovette® na krevní plyny oranžové ochranné víčko®.


Odběr krve bezpečnostní jehlou Safety nebo bezpečnostní jehlou Safety-Multifly®

2

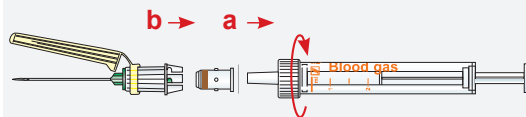

Nasadte membránový adaptér (obj. č. 14.1112) na Luer kónus Monovette® na krevní plyny (a) a spojte Monovette® na krevní plyny s bezpečnostní jehlou (b) anebo bezpečnostní jehlou Safety-Multifly®.


3

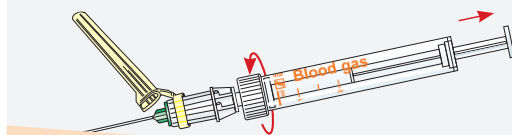

Odeberte příslušný krevní vzorek podle potřeby.


Odběr krve přes cévní přístup

2

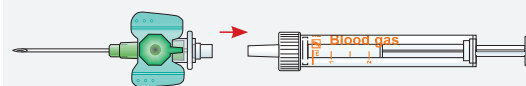

Připojte Monovette® na krevní plyny k intravenózní kanyle.


3

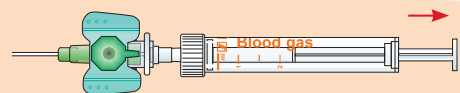

Pomalým zatažením za píst odeberte příslušný krevní vzorek podle potřeby.

Manipulace se vzorkem


4

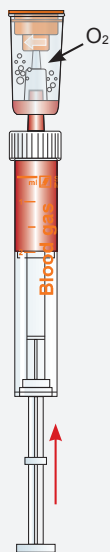

DŮLEŽITÉ!

Po nasazení odvzdušňovacího filtru (obj. č. 14.1148) odstraňte vzduch, aby jste se vyhnuli chybám v měření v důsledku kontaminace vzduchem.


5

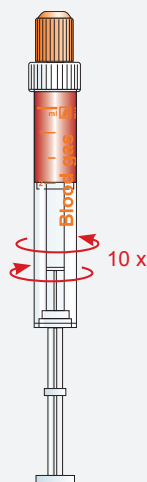

Ihned po odběru promíchejte krevní vzorek tak, že budete válet Monovette® na krevní plyny mezi spojenými dlaněmi.

6

0 - 15 Min.

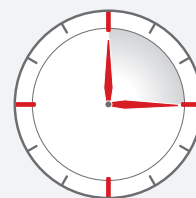

Analýza krevních plynů by měla proběhnout co nejdříve po odběru krve, nejpozději však 15 minut po odběru.