



# Agulha de segurança Safety

## Instruções de utilização

### Antes da colheita de sangue

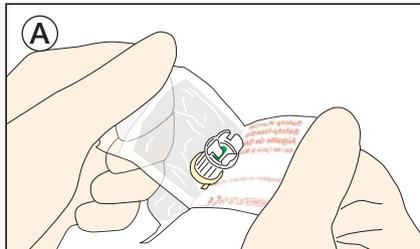


Abra a embalagem usando o seu polegar e o indicador.

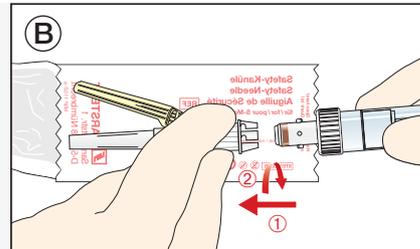


Encaixe a S-Monovette® no adaptador da agulha de segurança Safety.

OU

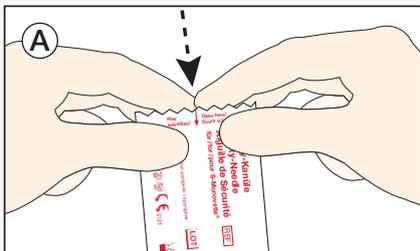


Rasgue a abertura da embalagem no sentido da seta central.

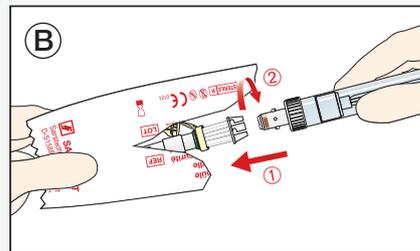


Encaixe a S-Monovette® no adaptador da agulha de segurança Safety.

### Depois da colheita de sangue

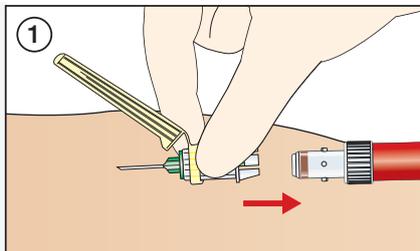


Retire a última S-Monovette® da agulha de segurança Safety e, em seguida, remova a agulha de segurança Safety da veia.


### Como ativar a proteção da agulha...

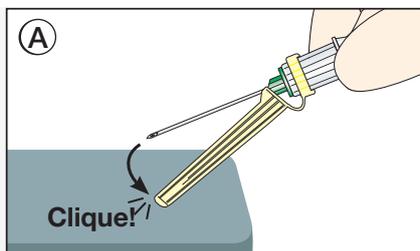

Coloque a proteção da agulha sobre uma superfície estável e pressione para baixo para travar a agulha.

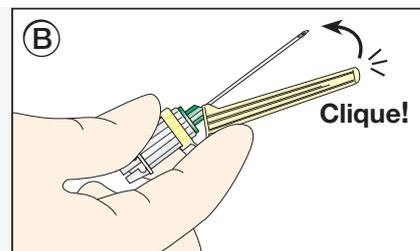

Em alternativa, pressione a parte inferior da tampa da proteção da agulha com o seu dedo indicador para cobrir e travar a agulha.

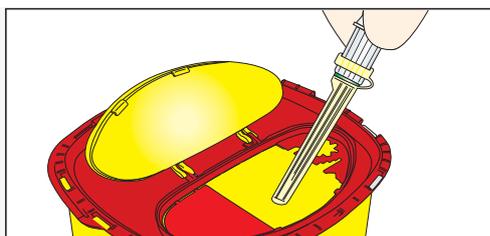


Após ativação da proteção da agulha, descarte a agulha de segurança Safety travada em segurança num contentor de corto-perfurantes.


# Agulha de segurança Safety-Multifly®

## Instruções de utilização

### Antes da colheita de sangue

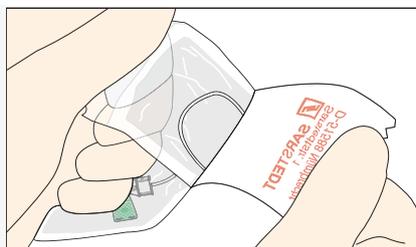


Abra a embalagem usando o seu polegar e o indicador.

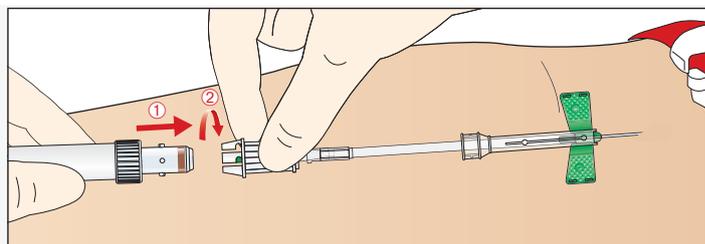

Encaixe a S-Monovette® no adaptador da agulha de segurança Safety-Multifly®.


### Depois da colheita de sangue

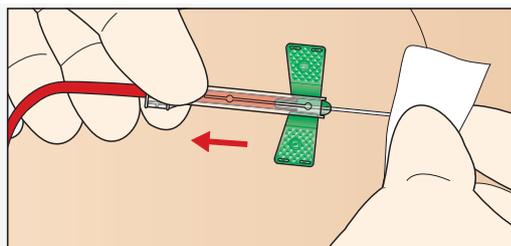


Segure a extremidade traseira do protetor de agulha entre o polegar e o dedo indicador antes de retirar a agulha de segurança Safety-Multifly® da veia.

### Como ativar a proteção da agulha...


...enquanto a agulha se encontra na veia ...após remoção da agulha da veia

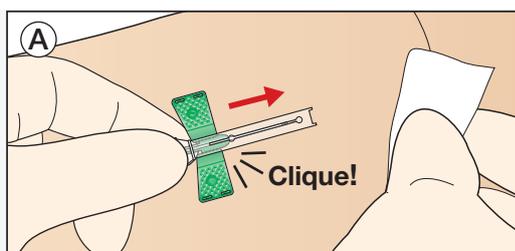

Deslize a proteção da agulha para a frente enquanto remove a agulha de segurança Safety-Multifly® da veia.

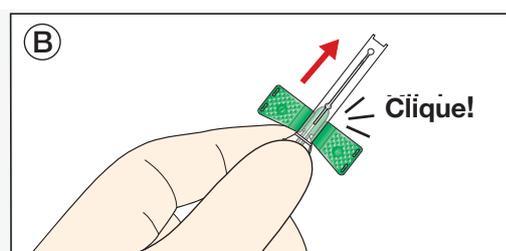

Remova a agulha de segurança Safety-Multifly® da veia e em seguida deslize a proteção da agulha para a frente.

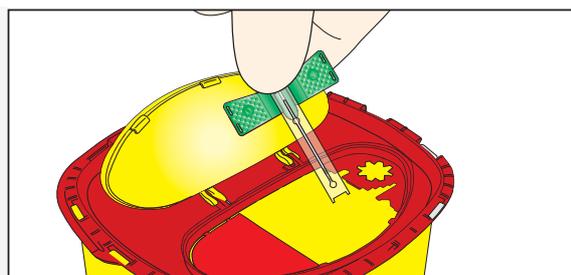

Após ativação da proteção da agulha, descarte a agulha de segurança Safety-Multifly® travada em segurança num contentor de corte-perfurantes.

SARSTEDT S.A.  
Estrada Nacional 249, Km 4,2  
Escritório B r/c - Nave 3  
Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro  
Tel: +351 21 915 6010  
Fax: +351 21 915 6019  
info.pt@sarstedt.com  
www.sarstedt.com