


Αιμοληψία με το S-Monovette®


Ο δρόμος για το τέλειο αποτέλεσμα

1 Προετοιμασία

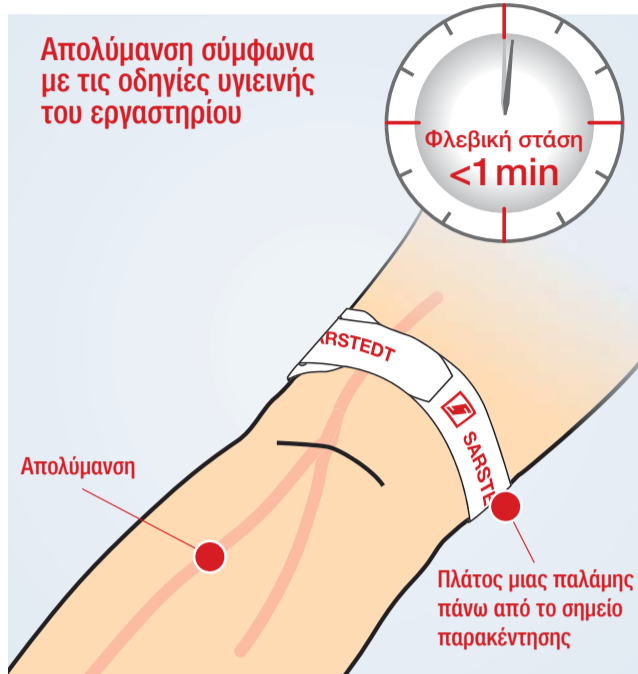


2 Αιμοληψία

Τεχνική αναρρόφησης – Η απαλή αιμοληψία

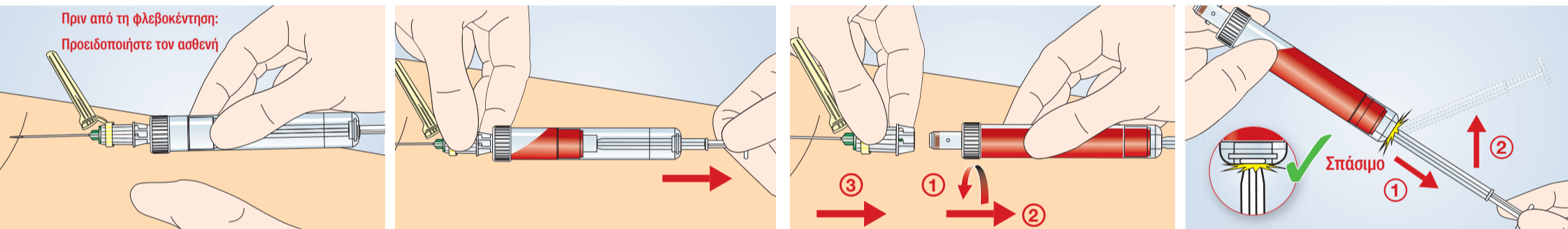

Τεχνική κενού³ – Αιμοληψία με φρέσκο κενό

Κατ' αρχήν η SARSTEDT συνιστά τη χρήση του πρώτου S-Monovette® με την τεχνική της αναρρόφησης, για να αρχίσετε με αυτόν τον τρόπο απαλά την αιμοληψία.

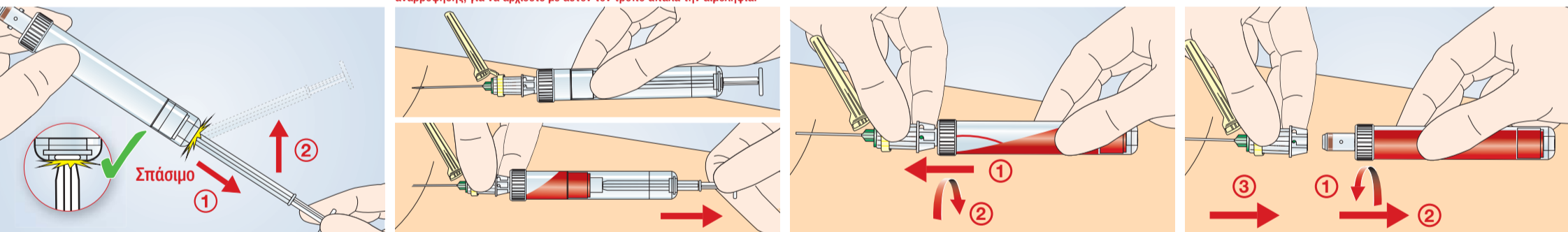

3 Χειρισμός δειγμάτων και απόρριψη

Γεμίστε ΣΩΣΤΑ για ακριβή αποτελέσματα



Ανακινήστε προσεκτικά πολλές φορές

Κίτρικό, CTAD, PFA
ΤΚΕ
Ηπαρίνη
EDTA, ThromboExact
Φθόριο
Κίτρικό φθόριο (S-Monovette® GlucoEXACT)
CPDA₁




Αποθηκεύστε και μεταφέρετε σωστά

Μετά από την αιμοληψία: Τοποθετήστε τον ορό/ορό-γέλη του S-Monovette® για 30 λ. σε όρθια θέση και έπειτα μεταφέρετε σε όρθια θέση



Ενεργοποίηση με το ένα χέρι

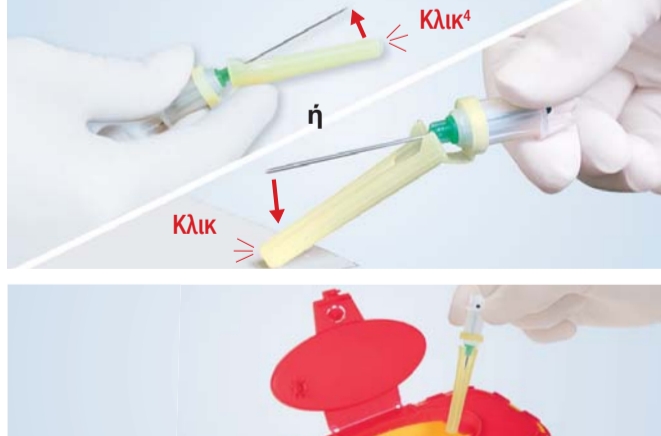

Θα θέλαμε να επισημάσουμε ότι τα θέματα που καλύπτονται εδώ («Αιμοληψία με το S-Monovette®») έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις ιατρικές, επιστημονικές ή τεχνικές συμβουλές.

³ Εάν πρέπει να ληφθεί πρώτα ένα σωληνάριο κίτρικού άλατος, συνιστάται η εκ των προτέρων λήψη ενός κενού σωληναρίου. Κατ' αρχήν η SARSTEDT συνιστά τη χρήση του πρώτου S-Monovette® με την τεχνική της αναρρόφησης, για να αρχίσετε με αυτόν τον τρόπο απαλά την αιμοληψία. Στη συνέχεια είναι δυνατή η συνέχιση της λήψης με την τεχνική κενού.
⁴ Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το προστατευτικό της βελόνας με τον δείκτη του χεριού σας. Για την ασφαλή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι αυτό συμβαίνει στο κάτω μέρος του προστατευτικού.