

Prelievo ematico con S-Monovette®


La strada per un risultato perfetto

1 Preparazione

Etichettatura del codice a barre



Disinfezione secondo il piano d'igiene della struttura

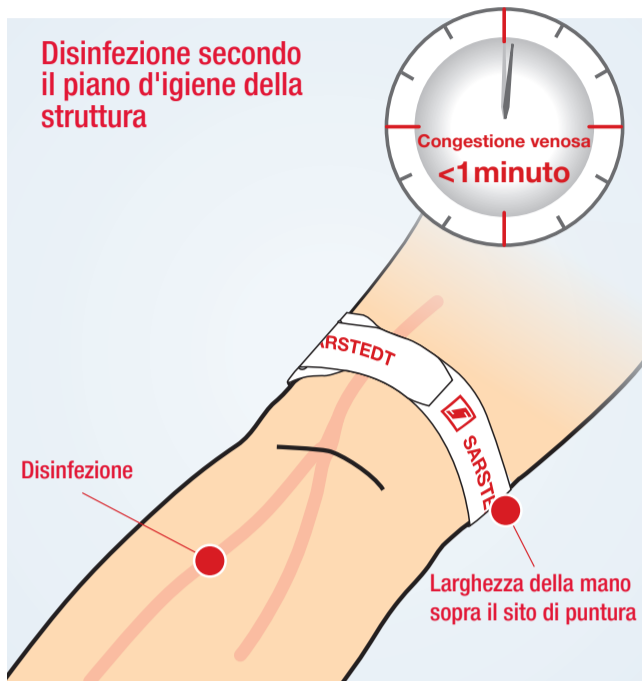


Sequenza di prelievo consigliata

Secondo Gurr ¹ :	Secondo CLSI ² :
Emocoltura	Emocoltura
Siero- /siero gel	Citrato
Citrato	Siero- /siero gel
Eparina- / eparina gel	Eparina- / eparina gel
EDTA	EDTA
Fluoruro/ citrato-fluoruro (S-Monovette® GlucoEXACT)	Fluoruro/ citrato-fluoruro, (S-Monovette® GlucoEXACT)


2 Prelievo ematico

Tecnica in aspirazione: il prelievo ematico delicato

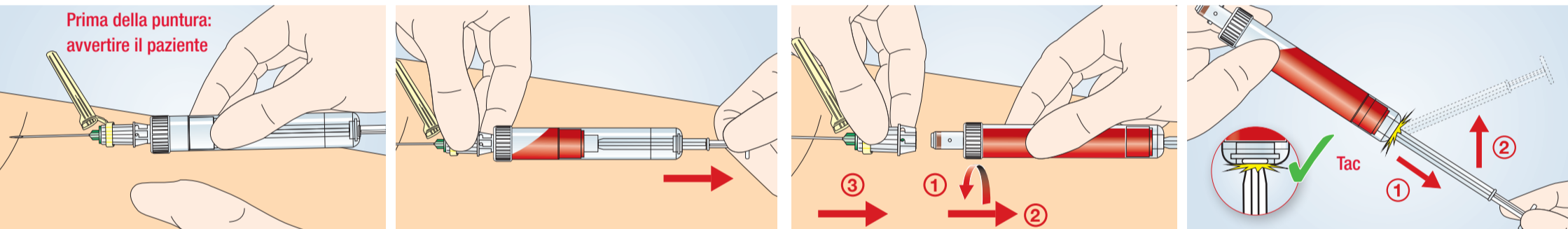

Tecnica sottovuoto³: prelievo ematico con vuoto fresco

In linea di principio, SARSTEDT consiglia di utilizzare la tecnica in aspirazione per la prima S-Monovette® per iniziare in modo delicato il prelievo ematico.

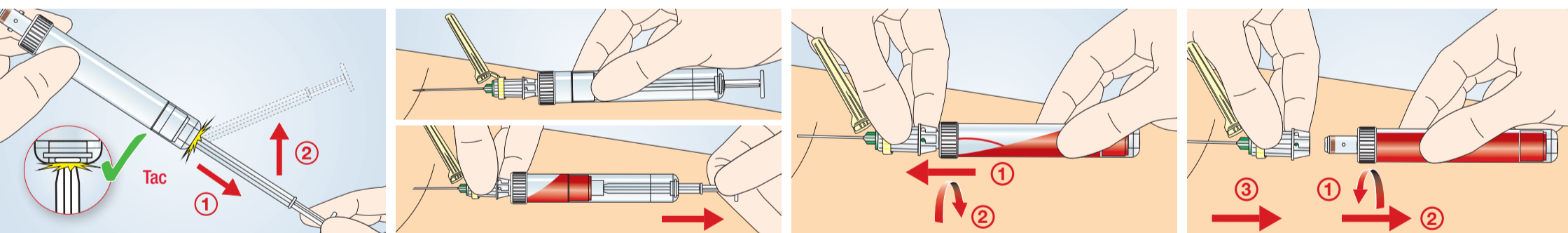

3 Gestione dei campioni e smaltimento

Riempire CORRETTAMENTE per ottenere risultati corretti



Capovolgere attentamente più volte

Citrato, CTAD, PFA
VES
Eparina
EDTA, ThromboExact
Fluoruro
Citrato fluoruro (S-Monovette® GlucoEXACT)
CPDA₁




Conservare e trasportare correttamente

Dopo il prelievo ematico: conservare S-Monovette® siero/siero gel per 30 min in posizione verticale e trasportare in posizione eretta



Attivazione con utilizzo di una sola mano

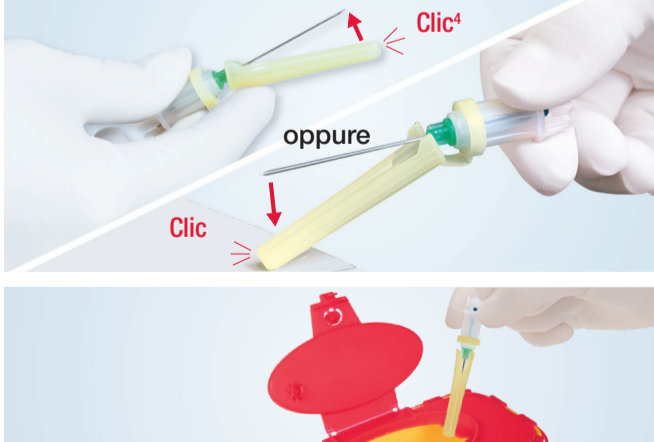

Ci preme sottolineare che gli argomenti qui trattati ("Prelievo di sangue con S-Monovette®") hanno puramente carattere di raccomandazione e non sostituiscono in alcun modo una consulenza medica, scientifica o tecnica.

³ Se deve essere prima estratta una provetta di citrato si consiglia di prelevare in precedenza una provetta vuota.
In linea di principio, SARSTEDT consiglia di utilizzare la tecnica in aspirazione per la prima S-Monovette® per iniziare in modo delicato i prelievi ematici.
La tecnica sottovuoto può quindi essere utilizzata per un ulteriore prelievo.
⁴ È possibile attivare il copriago anche con il dito indice. Per un funzionamento sicuro, assicurarsi che l'operazione venga eseguita all'estremità inferiore della protezione.