

Lancette d'incision Safety-Heel® Nouveau-né/Prématuré

Ponction au talon chez les prématurés et les nouveau-nés



Flux sanguin optimal et profondeur d'incision contrôlée

Les endocrinopathies et les maladies métaboliques héréditaires doivent être détectées à un stade précoce afin de pouvoir instaurer un traitement approprié et efficace. À cet effet, le sang doit être prélevé lors d'un « dépistage néonatal » (généralement par ponction au talon). La ponction avec les lancettes conventionnelles se faisant par incision verticale, le risque de blessure (incision jusqu'à l'os) et de formation d'un hématome est très élevé. Il s'agit souvent d'une procédure douloureuse. La lancette d'incision Safety-Heel® offre une réelle possibilité de réduire cette douleur tout en optimisant le prélèvement sanguin.


L'incision semi-circulaire de faible profondeur minimise la formation d'un hématome. Cette procédure permet une collecte de sang plus en douceur chez les petits patients.

Lancette innovante très rapide avec une technique d'incision semi-circulaire en douceur

- Débit sanguin optimal sans pression ni massage supplémentaire
- Volume sanguin suffisant
- Atténuation importante de la douleur ressentie
- Cicatrisation rapide grâce à la faible profondeur de pénétration
- Formation d'hématome minimisée




Lancette d'incision Safety-Heel® Nouveau-né/Prématuré

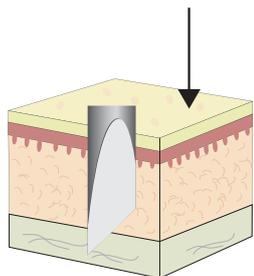

Lancette standard


- Mouvement de piqûre **vertical** de la lame
- Entaille cylindrique
- Formation d'hématome

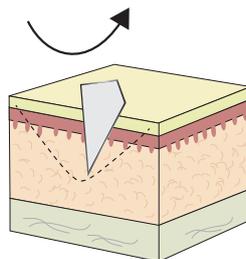


Lancette d'incision

- Incision **semi-circulaire**
- Profondeur d'incision réduite
- Minimise la formation d'hématome

Manipulation de la lancette d'incision Safety-Heel®

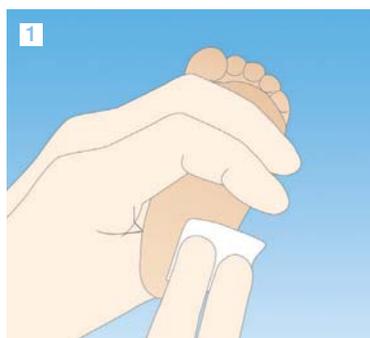


1 Choisir le site de ponction approprié et le désinfecter.

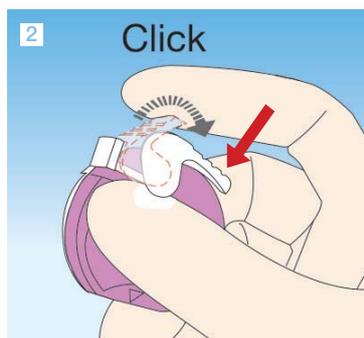


2 Retirer le dispositif blanc de sécurité avec l'index: la lancette est prête pour l'incision.




3 Soulever le pied dans une position appropriée. Placer fermement la lancette contre le site de ponction choisi et désinfecté. Activer le bouton déclencheur. La lancette d'incision doit **toujours être positionnée parallèlement à l'axe du pied avant d'être activée (jamais en transversal)**. La pointe du triangle indique le point d'incision de la lame.

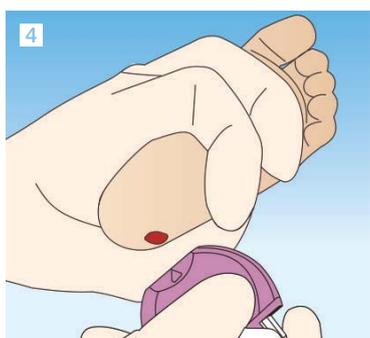

4 Après avoir appuyé sur le bouton déclencheur, retirer la lancette.

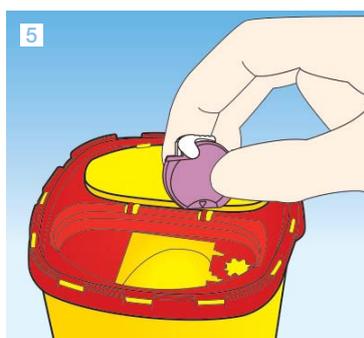

5 Éliminer la lancette dans une boîte à déchets appropriée.

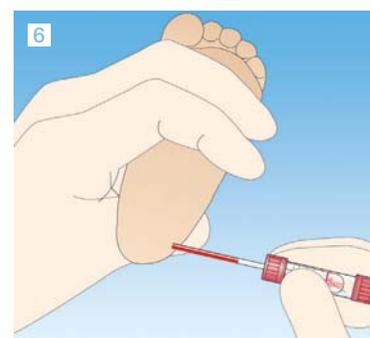

6 Éliminer la première goutte de sang. Remplir ensuite le tube capillaire.

Références de commande

	Référence	Application	Profondeur d'incision	Longueur d'incision	Conditionnement
●	85.1025	Prématurés	0,85 mm	1,75 mm	50 / boîte 200 / carton
●	85.1026	Nouveau-nés	1,0 mm	2,5 mm	

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Mentions légales: Lancettes Safety Heel – Dispositifs stériles à usage unique pour le prélèvement de sang capillaire au talon des nouveaux nés. Dispositif Médical de classe IIA selon la Directive 93/42/CE – Marquage CE0197 – Fabricant Sterilance Medical Inc. R.P Chine

