

Notkunarleiðbeiningar Formalin kerfi


Tenging kerfisins:




1. Gakktu úr skugga um að kerfið sé þétt og óskemmt.
2. Hengdu kerfið í veggfestinguna sem því fylgir (REF 95.1706).
3. Athugaðu hvort kraninn sé í lokaðri, láréttri stöðu.

Notkun kerfisins:


1. Notaðu viðeigandi öryggishanska.
2. Notaðu útsýnisgluggann til að tryggja að vökvinn í flöskunni sé litlaus, tær og gegnsær.
Farga verður kerfinu við minnstu merki um ský eða aflitun.

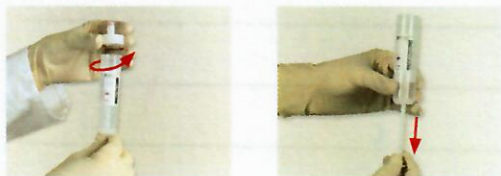

3. Skrúfaðu lokið af S-Monovette® til að setja sýnið í það.
Ef ekki á að fylla S-Monovette® alveg skaltu draga stimpilinn á opnu S-Monovette® aðeins niður.
4. Lokaðu S-Monovette® aftur með skrúfuhettunni.

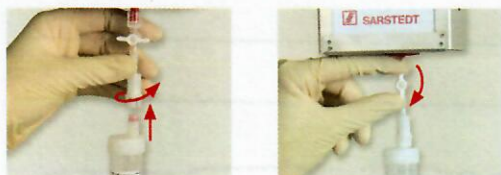

5. Tengdu nú S-Monovette® við millistykki formalínkerfisins og festu tenginguna með því að snúa S-Monovette® um það bil 2-3 mm til hægri.
6. Opnaðu kranann með því að snúa honum 90°. Þú getur síðan fyllt S-Monovette® með formalíni með því að draga stimpilinn niður.

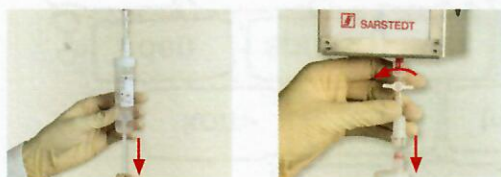

7. Vinsamlegast athugið að það verður að draga stimpilinn niður að stöðvun og ekki er hægt að forðast loftið á efra svæðinu.
Ekki ýta stimplinum aftur í gagnstæða átt að fjarlægingarstefnunni!
Ef þetta gerist verður að farga kerfinu.
8. Lokaðu kerfinu með því að snúa krananum aftur 90°.
Til að aftengja S-Monovette® frá kerfinu, snúðu því um það bil 2-3 mm til vinstri.





9. Athugaðu aftur hvort tappi formalínkerfisins sé í lokaðri, láréttri stöðu.
10. Brjótið síðan útstæðu stimpilstöngina af.

Förgun kerfisins:

1. Fargaðu ílátum sem innihalda formalín og einnota hönskum sem notaðir hafa verið í samræmi við ykkar reglur.

2nd Correction 02/02/2021 IS Print release: yes no ck

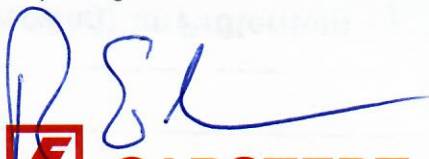2.2.21 
 **SARSTEDT**