

Torniquete de uso único

NOVO!



A solução higiênica para melhor segurança

- Minimiza risco de contaminação
- Fácil manuseio
- Sem beliscar – sem dores na pele


Ótimo padrão higiênico

Torniquetes de utilização única minimizam o perigo de contaminação cruzada e infecções nosocomiais causadas por punção venosa.


Esse torniquete é feito de um material de composição especial que garante um padrão de higiene com o máximo de conforto para o paciente.




Guia do usuário

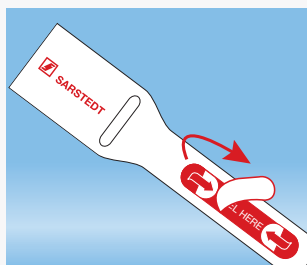


- Puxe o torniquete da embalagem e rasgue na linha perforada
- Remova o rótulo "ABRA AQUI"

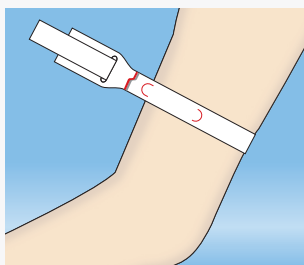


- Passe o torniquete em volta do braço com a face impressa para cima

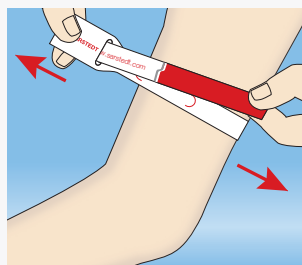

- Amarre um pouco acima do lugar de punção e tape o local
- A pulsação deve estar perceptível (50-100 Hg pressão do torniquete)
- Tempo de constrição máxima: 1 min

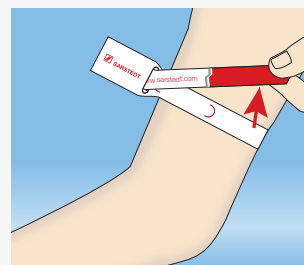

- Retire e descarte

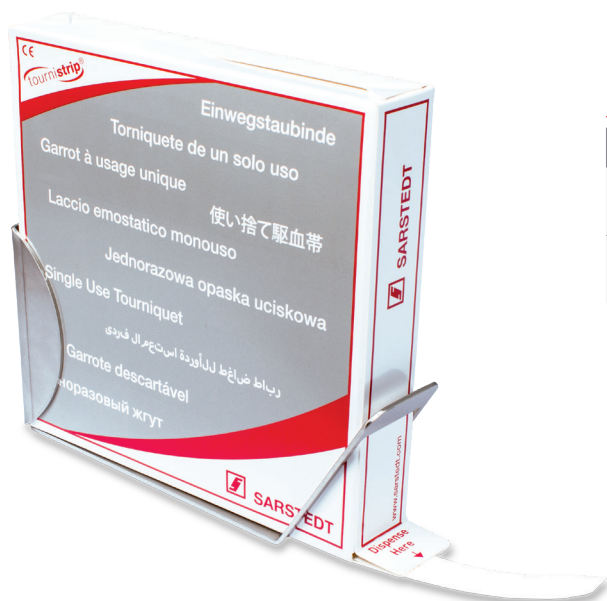

Informações para pedidos

Código	Descrição	Embalagem
95.1006	Torniquete de uso único	200 por caixa
95.1005	Suporte de parede	1 / caixa interna

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
Santana de Parnaíba - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com