

Одноразовый жгут

НОВИНКА



Гигиеничное решение для повышения безопасности.

- Минимизация риска инфицирования.
- Простота в применении.
- Отсутствие болевых ощущений даже при наличии волосяного покрова.


Высокий стандарт гигиены

Одноразовый жгут минимизирует риск возникновения перекрестного инфицирования и внутрибольничных инфекций при взятии крови.


Жгут сделан из специального комбинированного материала (бумага/пластик), что соответствует гигиеническим стандартам и обеспечивает максимальный комфорт пациента.




Использование жгута

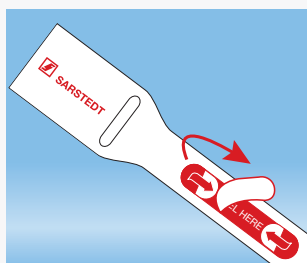


- Вытяните жгут из упаковки и оторвите по направлению перфорированной линии.
- Удалите этикетку «PEEL HERE»

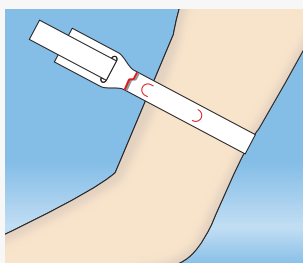


- Наложите жгут на руку так, чтобы сторона с надписью SARSTEDT была снаружи.

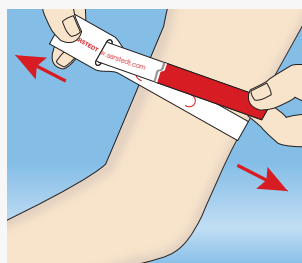

- Расположите жгут на несколько сантиметров выше места пункции
- Пульс должен ощущаться (давление жгута на руку в пределах 50-100 мм рт. ст.)
- Максимальное время наложения жгута: 1 мин.

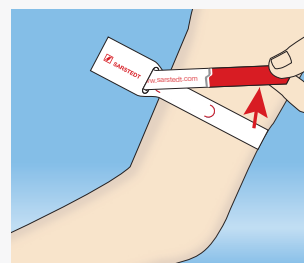

- Отсоедините и утилизируйте.

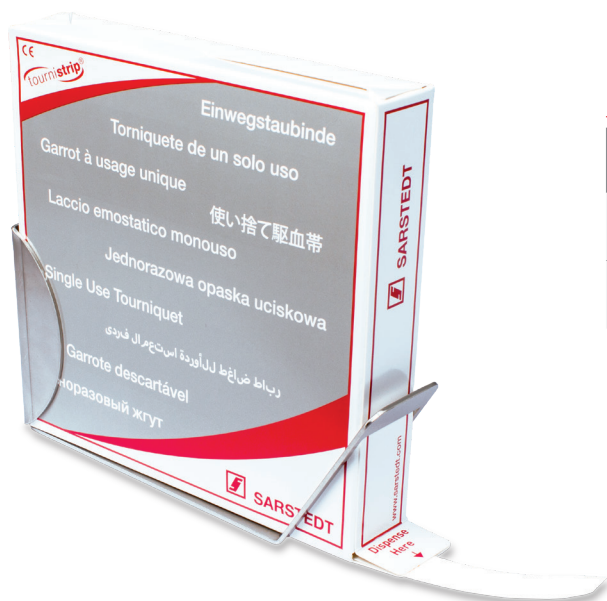

Информация для заказа

| Каталожный номер | Описание | Упаковка |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 95.1006 | Одноразовый жгут | 200 шт. в коробке |
| 95.1005 | Настенный держатель | 1 шт. в коробке |

SARSTEDT AG & Co.
115093 Москва,
Люсиновская 36 стр. 1
115093 Moskau
Тел./факс: +7 (495) 937-52-28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com