

# Abridor de segmentos de tubo flexível

Coleta fácil e segura de amostras de segmentos de tubo flexível



## Abridor de segmentos de tubo flexível


- Risco mínimo de contaminações e ferimentos
- Não há necessidade de tesoura ou faca
- Manuseio fácil e seguro



# Abridor de segmentos de tubo flexível



Insira o segmento de tubo levemente inclinado no abridor de segmentos de tubo flexível e deslize-o para a frente, sem apertar o tubo.

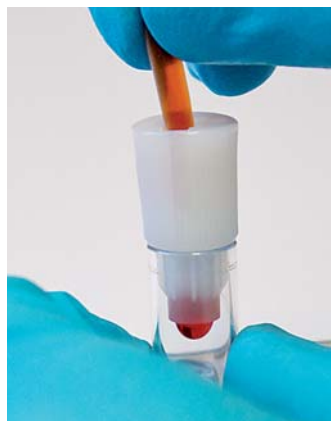

Pressione uma vez a extremidade do tubo para dispensar uma pequena gota de sangue.



Para esvaziar o segmento de tubo flexível, dobrar e apertar o tubo. É possível evitar o gotejamento reduzindo a pressão antes de remover segmentos de tubo flexível.



## Informações para pedidos

Código	Descrição	Embalagem
95.1000	Abridor de segmentos de tubo flexível	2.000/caixa
95.1000.476	Abridor de segmentos de tubo flexível com tubos 75 x Ø 12 mm, montado	400/caixa, embalagem empilhável
95.1000.800	Abridor de segmentos de tubo flexível com Ø interno de 8,2 mm	2.000/caixa
55.476	Tubos 75 x Ø 12 mm, PS	2.000/caixa, embalagem empilhável
55.476.005	Tubos 75 x Ø 12 mm, PS	2.000/caixa
86.1509	Tubos 75 x Ø 11,5 mm, vidro	2.352/caixa, embalagem empilhável

Sarstedt LTDA  
Alameda Ásia, 144  
Polo Empresarial Tamboré  
CEP 06543-312  
Santana de Parnaíba - SP  
Tel: +55 11 4152 2233  
Fax: +55 11 4152 3198  
info.br@sarstedt.com  
www.sarstedt.com