



Instrucciones importantes de uso

Monovette® gas en sangre


Recolección de sangre con la aguja S-Monovette® de seguridad o Aguja Multifly® de seguridad.

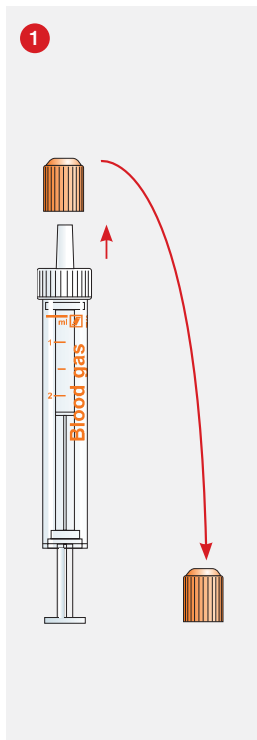

1 Remueva el tapón protector naranja del Monovette® gas en sangre.

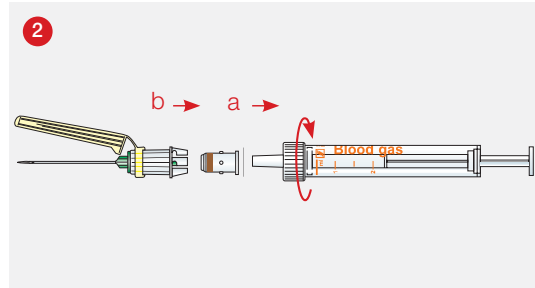


2 Una el adaptador de membrana (Cat. 14.1112) al cono Luer del Monovette® gas en sangre (a) y conecte el Monovette® gas en sangre con la aguja de seguridad (b) o la aguja Multifly® de seguridad.

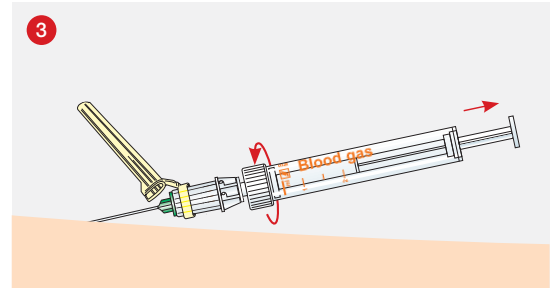


3 Recolecte la sangre de acuerdo a sus procedimientos estandarizados.

Recoleccion de sangre via catéter

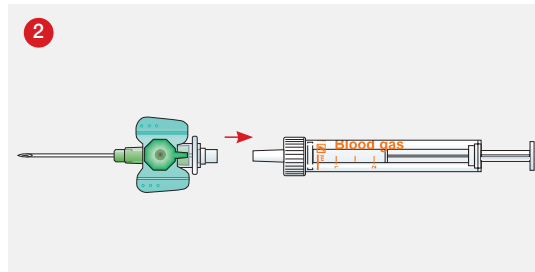


2 Conecte la Monovette® gas en sangre al catéter.

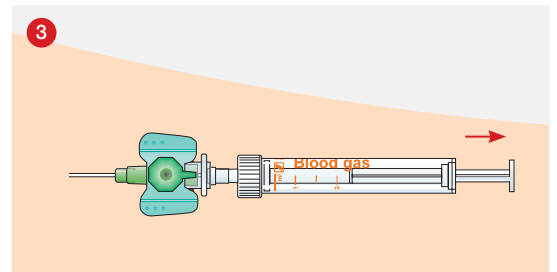


3 Recolecte la sangre tirando del émbolo lentamente de acuerdo a sus procedimientos estandarizados.

Manejo de la muestra

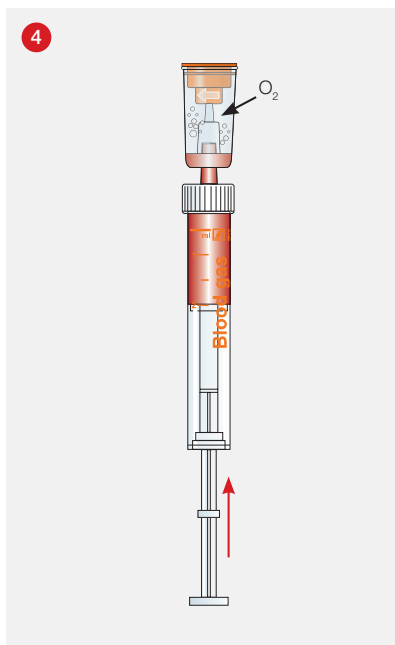


IMPORTANTE!

Para prevenir resultados falsos causados por contaminación con aire, retire el aire uniendo el ventilador (Cat. 14.1148) y presionando cuidadosamente el émbolo hacia arriba.

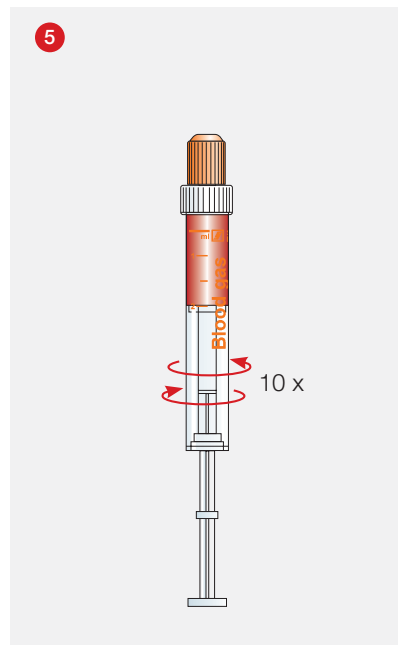

Mezcle la muestra de sangre inmediatamente después de recolectarla girando la Monovette® gas en sangre entre sus palmas.

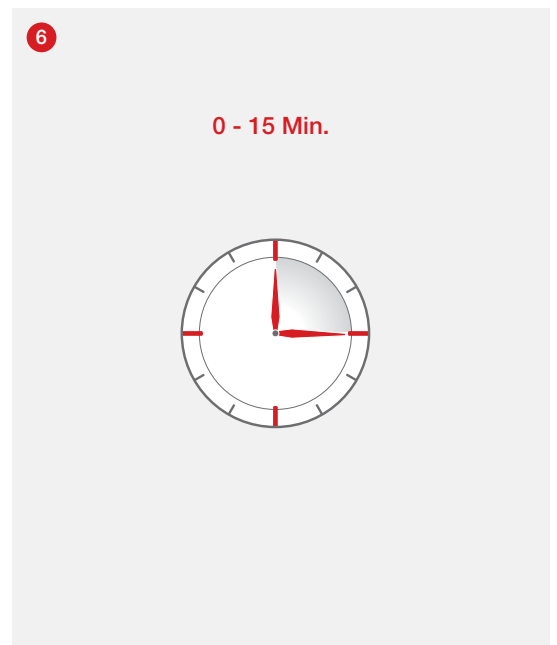

Para mejores resultados, los análisis de gases deben realizarse dentro de los primeros 15 minutos de haber recolectado la muestra.