

# AL-Flex

Αυτόνομη μονάδα διαμοιρασμού σε υποπολλαπλάσια



## AL-Flex – Η συμπαγής αυτόνομη μονάδα διαμοιρασμού σε υποπολλαπλάσια

- Έξυπνη διαχείριση όγκου
- Πιπετάρισμα χωρίς επιμολύνσεις
- Ενσωματωμένη επισήμανση του σωληναρίου υποπολλαπλάσιας ποσότητας με γραμμωτό κώδικα αμέσως πριν την πλήρωση
- Για σωληνάρια υποπολλαπλασίου σε 3 μεγέθη
- Με δυνατότητα διαμόρφωσης για όλα τα συνήθη συστήματα στατό

## Για ασφαλή και γρήγορη υπο-διανομή σε δευτερογενή σωληνάρια δειγμάτων

Συχνά αποστέλλεται στο ιατρικό εργαστήριο μόνο ένα σωληνάριο με υλικό δείγματος για κλινική-χημική / ανοσολογική ανάλυση, ωστόσο οι απαιτούμενες αναλυτικές ουσίες πρέπει να προσδιορίζονται σε διαφορετικούς σταθμούς ανάλυσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο διαμοίρασμός σε υποπολλαπλάσια, η υπο-διανομή δηλαδή του υλικού του δείγματος σε δευτερογενή σωληνάρια, προσφέρει τη δυνατότητα παράλληλης εργασίας, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν ένα χρονικό πλεονέκτημα. Το AL-Flex παρέχει την τεχνική λύση για αυτόν τον σκοπό.

Τα ανοιχτά κύρια σωληνάρια, τα οποία προορίζονται για διαμοίρασμό σε υποπολλαπλάσια, τροφοδοτούνται στη συσκευή σε καθορισμένους φορείς προέλευσης. Ένα ερώτημα για κάθε κύριο σωληνάριο ανακτά από το LIS τις πληροφορίες για τα απαιτούμενα δευτερογενή σωληνάρια. Το AL-Flex επισημαίνει το αντίστοιχο δευτερογενές σωληνάριο με ένα αντίγραφο του κύριου γραμμωτού κώδικα και πιπετάρει τον απαιτούμενο όγκο. Τα αγωγήμια ρύγχη μίας χρήσης εξασφαλίζουν την ακριβή μέτρηση της στάθμης πλήρωσης και το πιπετάρισμα χωρίς επιμολύνσεις. Τα δευτερογενή σωληνάρια καθώς και τα κύρια σωληνάρια μεταφέρονται σε καθορισμένους φορείς προορισμού και μεταφέρονται χειροκίνητα στο σταθμό ανάλυσης για περαιτέρω επεξεργασία.

Για τα δευτερογενή σωληνάρια είναι διαθέσιμα διάφορα σχήματα.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Απόδοση:</b>	έως και 285 διαμοίρασμοί από 285 κύρια σωληνάρια ανά ώρα	<b>Φορείς φιαλιδίων:</b>	Όλα τα συνήθη γραμμικά στατό, τμήματα ή δίσκοι
<b>Τύποι φιαλιδίων:</b>	Ανοιχτό κύριο σωληνάριο: Μήκος: 65 - 100 mm Διάμετρος: 13 - 16 mm Ø  Δευτερογενή σωληνάρια 75 x 13 mm, με ενδιάμεσο πυθμένα, 2,5 ml 75 x 13 mm, με στρογγυλό πυθμένα, 5,0 ml 92 x 15 mm, με ενδιάμεσο πυθμένα, 5,0 ml	<b>Διαστάσεις:</b>	Πλάτος: 850 mm (με Panel PC 1280 mm) Βάθος: 1430 mm Ύψος: 1800 mm

## Πληροφορίες παραγγελίας – Παρελκόμενα

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή
63.1575.115	Σωληνάριο υποπολλαπλασιασμού GZ 75 x 13 SV
63.1475.115	Σωληνάριο υποπολλαπλασιασμού G 75 x 13 SV
60.612.115	Σωληνάριο υποπολλαπλασιασμού GZ 92 x 15 SV
70.1191.103	Αγώγιμο ρύγχος, μακρύ, σε στατό
91.191.330	Ετικέτα 40 x 26 mm, 3.000 τμχ./κύλινδρος
91.191.311	Μεμβράνη TT, 54 mm, 1 κύλινδρος

SARSTEDT M.E.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com