

Garrot patient unique

conçu pour une prévention efficace contre les infections



- Utilisation axée sur la prévention des contaminations croisées
- Matériau très souple et sans latex pour un confort optimisé
- Manipulation simple et intuitive
- Une taille unique convenant aussi bien aux enfants en bas âge qu'aux adultes

Manipulation aisée d'une seule main

Le garrot TourniSTRETCH® a été développé afin de permettre une prévention efficace des infections.

Fabriqué à partir d'un matériau souple, il exerce une tension optimale grâce à son élasticité importante et homogène: le patient continue de ressentir un certain confort.

Le système intuitif de pose du garrot, la simplicité de serrage et le desserrage rapide permettent aux utilisateurs une manipulation simple tout en contribuant à la technique d'utilisation à une seule main.



Manipulation



Appliquer le garrot TourniSTRETCH® autour du bras en veillant à ce que le bouton soit orienté vers le haut



Faire passer le garrot à travers la boucle et le tirer en conséquence



Enclencher le bouton dans un des trous de l'extrémité du garrot pour le fixer en position



De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.sarstedt.com/tournistretch

Informations pour commande

Réf.	Désignation	Conditionnement
95.1008	Garrot patient unique TourniSTRETCH®	25 unités/sachet, 500 unités/carton

Mentions légales: Garrots à usage unique - Dispositifs non stériles à usage unique pour le prélèvement sanguin veineux.
Dispositif Médical de classe I selon Directive 93/42/CE - Fabricant :
ASep Healthcare Ltd, Royaume Uni – Mandataire UE : Sarstedt AG&Co.KG, Allemagne

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com