


Aplicação correta de uma etiqueta de código de barras em um S-Monovette® com uma etiqueta de plástico transparente

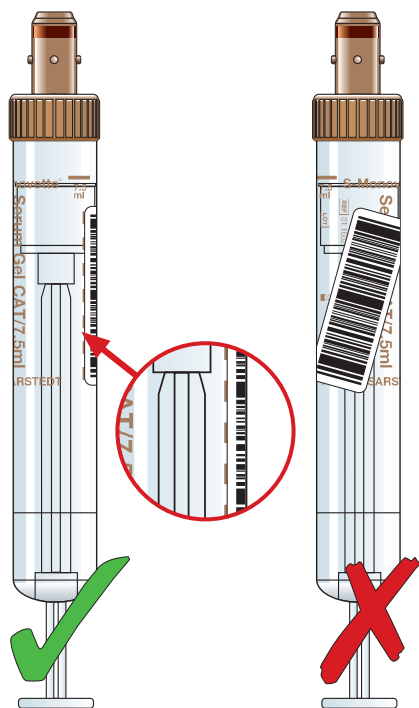

Certo

Errado


- Cole a etiqueta de código de barras **ao longo da linha tracejada** da etiqueta de plástico do S-Monovette®
- Não cole a etiqueta do código de barras **diagonalmente ou ao redor**

Os recipientes de amostra com etiqueta de plástico são corretamente rotulados se:

- a etiqueta do código de barras for colada ao longo da linha tracejada da etiqueta plástica do S-Monovette®.
- o conteúdo pode ser visto com clareza.
- o nível pode ser verificado.
Aplique então a etiqueta abaixo da marca de enchimento.
- a etiqueta não impede que a tampa seja aberta.
- o tubo e a etiqueta não emperram ou grudam na centrífuga.



Aplicação correta de uma etiqueta de código de barras em uma S-Monovette® com uma etiqueta de papel

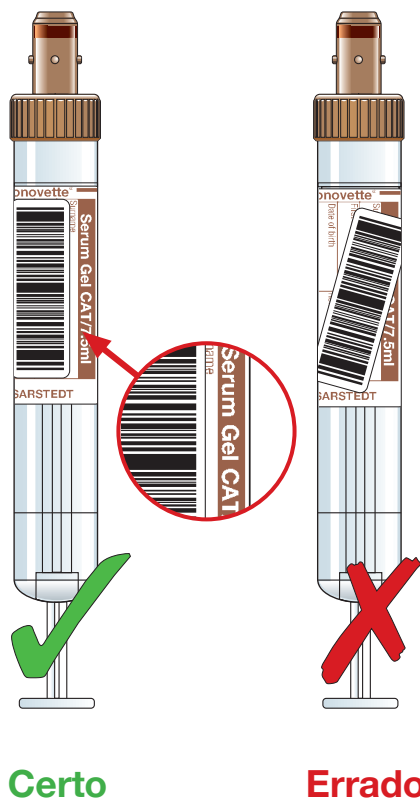

- Cole a etiqueta de código de barras nivelada **sobre a** etiqueta de papel existente do S-Monovette®. As letras da preparação ficam à direita da etiqueta do código de barras.
- **Não** cole a etiqueta de código de barras junto da etiqueta de papel, pois o campo de visão da amostra deve permanecer livre para controle visual.

Os recipientes de amostra com etiquetas de papel são corretamente rotulados se:

- a etiqueta de código de barras estiver colada sobre a etiqueta de papel existente do S-Monovette®.
- o conteúdo pode ser visto com clareza.
- o nível pode ser verificado.
- a etiqueta não impede que a tampa seja aberta.
- o tubo e a etiqueta não emperram ou grudam na centrífuga.



SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Soamim
CEP 18540-000
Porto Feliz - SP
Tel: +55 11 4152 2233
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com