

NFT

System pro odběr moči

Získávání vzorků s hygienicky uzavřenou funkcí odběru bez jehly



NFT

Needle Free Transfer

Preanalýza
moči
2.0

První systém pro odběr moči od firmy SARSTEDT pro hygienicky uzavřený sběr vzorků bez použití jehly

Hygienicky. Prakticky. Bezpečně.

Jak může být sběr vzorků moči ještě bezpečnější, hygieničtější a jednodušší? Odpověď na tuto otázku přináší inovativní produkty systému NFT. Jako první uzavřený systém pro odběr moči bez použití jehly firmy SARSTEDT tato nová skupina produktů spojuje výhody existujících produktů do jediného řešení.


Nové standardy pro preanalýzu moči



- Dostupné jako kelímek na moč NFT a také jako 3litrová sběrná láhev na moč NFT pro sběr moči po dobu 24 hodin
- Odběrový systém bez kovu a jehel
- Bezpečné skladování a bezpečný transport
- Jednoduchý a hygienický transport moči pomocí zkumavek Urine Monovette®
- Pro likvidaci produktů NFT není potřeba nádoba odolná proti propíchnutí

Jednoduše praktické

Zkumavka Urine Monovette® umožňuje hygienické získávání moči a je vhodná také jako analytická nádobka pro testovací proužky a provádění analýz, jakož i centrifugační zkumavka pro získání sedimentu

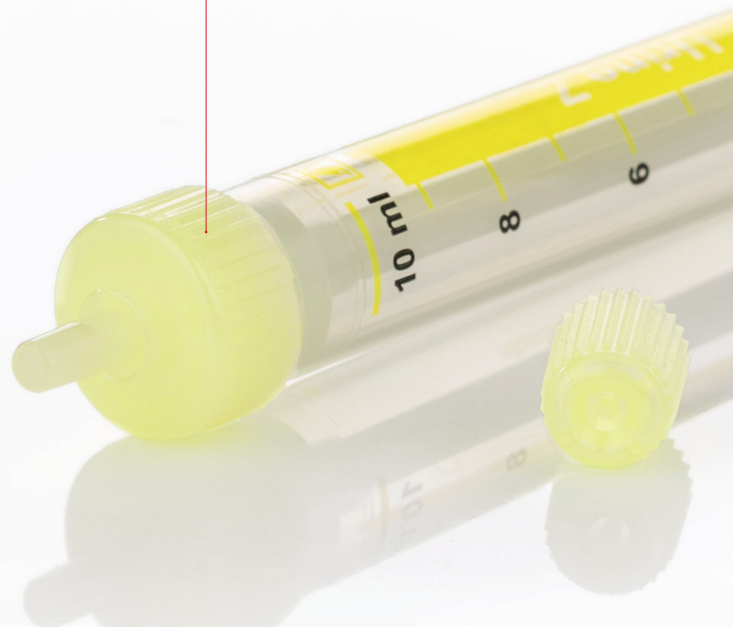


Novinka

U nové funkce odběru bez jehly již není potřebná jehla. Zkumavka Urine Monovette® lehce proniká novou membránou NFT.


Po pohodlném odběru je přístup i po několika odběrech okamžitě opět těsně a hygienicky uzavřen.

Nevzniká nebezpečí infekce v důsledku poranění hrotem jehly.

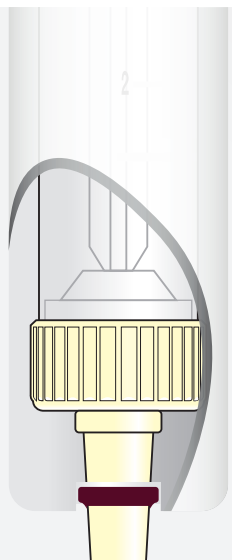

PŘESVĚDČIVÉ

- ✓ **Minimální nebezpečí poranění a vyšší bezpečnost při používání** pro personál i pacienta díky odběru vzorků bez použití jehly
- ✓ **Úspora při likvidaci**, protože součásti systému NFT se nemusí likvidovat odděleně v kontejnerech bezpečných proti propíchnutí

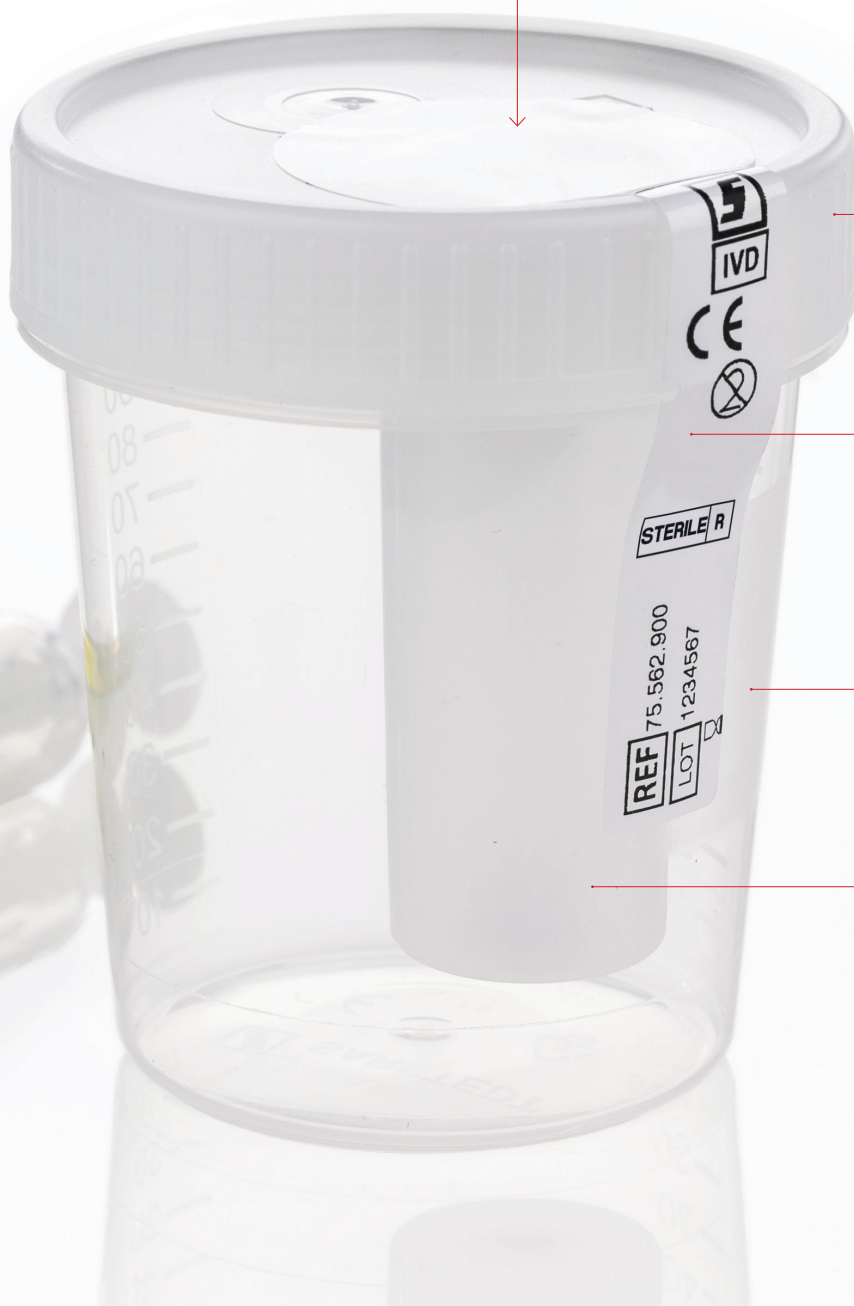

Šroubovací víčko s transferovou jednotkou s utěsněním proti prolínání **tekutin a zápachu**

Zapečetěné

Neporušenost bezpečnostní etikety indikuje vnitřní sterilitu kelímku na moč NFT

Průhledné

Vysoce transparentní nádobka z odolného polypropylenu (PP) pro dobré optické vyhodnocení

Inovativní

Transferová jednotka bez jehly s propíchnutelnou membránou NFT

NFT

System pro odběr moči

To nejlepší z několika systémů

System NFT se zkumavkou Urine Monovette[®], kelímkem na moč NFT a sběrnou láhví na moč NFT zajišťuje hygienické pracovní podmínky během celého procesu získávání vzorků:

- Pomocí zkumavky Urine Monovette[®] a přiložené nasávací špičky můžete proces odběru provést i při velmi malém objemu naplnění bez použití jehly. Není potřebná samostatná transferová jednotka jako u vakuových systémů.
- Intuitivní manipulaci si lze osvojit rychle a bez náročného zaškolení.
- Pomocí zkumavky Urine Monovette[®] je možné v případě potřeby proces odběru díky principu aspirace opakovat – nevzniká nebezpečí ztráty funkce v důsledku chybného použití.
- Díky promyšlené funkci odběru bez použití jehly se minimalizuje riziko poranění personálu a pacienta.
- Po odběru se produkty systému NFT nemusí likvidovat odděleně a bezpečně proti propíchnutí – to představuje úsporu času a peněz v porovnání s produkty s integrovanou jehlou.

Promyšlené

Sběrná láhev na moč NFT o objemu 3 000 ml, s ergonomickou rukojetí, velkým otvorem a transparentním průhledem se stupnicí po 100 ml



Urine Monovette® – hygienická práce s minimem úkonů

- Zkumavka Urine Monovette® umožňuje hygienické získávání vzorků bez použití jehly ze sběrných nádob na moč nebo ze systémů pro odvádění moči.
- Analýzu moči pomocí běžných testovacích proužků je možné provádět přímo v naplněné zkumavce Urine Monovette®.
- Zkumavka Urine Monovette® je vhodná pro transport a zaslání v souladu s předpisy pro obaly P650 dle ADR a IATA. Je možné ji použít pro získávání sedimentu v centrifuze a analyzátoch.



Uživatelsky příjemná manipulace: Kelímek na moč NFT



Komfortní při sběru moči po dobu 24 hodin: Sběrná láhev na moč NFT



Díky uzavřené funkci odběru je získávání vzorků čistou záležitostí i u velkoobjemové sběrné láhve na moč NFT.



Podívejte se na tutoriál pro snadnou manipulaci s produkty NFT: sarstedt.com/nft-tu-cz

OBJEDNEJTE SI BEZPLATNĚ VZOREK PRODUKTU



sarstedt.com/nft-sa-cz



Systém pro odběr moči NFT od firmy SARSTEDT přináší nové standardy

Pouze čistý a správně provedený sběr vzorků zaručuje správné výsledky rozborů. Produkty systému NFT firmy SARSTEDT přináší nové standardy pro rutinní a řádnou preanalýzu a současně maximální bezpečnost pro uživatele a pacienta.



Produkty NFT není nutné likvidovat odděleně a bezpečně proti propíchnutí.


Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Využijte synergie našich
vzájemně sladěných systémů.

Objevte 360°
řešení pro
preanalytický
systém firmy
SARSTEDT



workflow.sarstedt.com

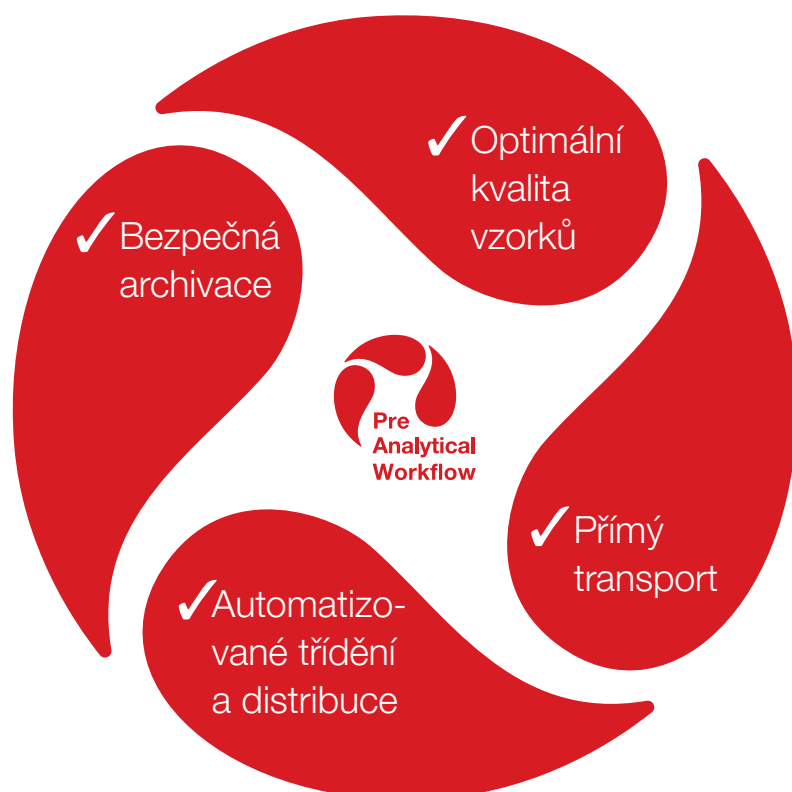

Kelímek na moč NFT 100 ml

Objednáací č.	Objem	D x Ø	Provedení	Čistota	Balení (vnitřní karton/vnější karton)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	s bezpečnostní etiketou a transferovou jednotkou	sterilní	200 / 200

Sběrná láhev na moč NFT 3,0 l

Objednáací č.	Objem	D x Š x V	Provedení	Čistota	Balení (vnitřní karton/vnější karton)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	s přiloženou transferovou jednotkou a etiketou pro identifikaci pacienta, průměr otvoru 80 mm	-	30 / 30

Urine Monovette® Z - bez preparace

Objednáací č.	Objem	D x Ø	Provedení (žlutá)	Čistota	Balení (vnitřní karton/vnější karton)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Papírová etiketa, popisovatelná	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Papírová etiketa, popisovatelná	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná, jednotlivě v blistru	sterilní	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Papírová etiketa, popisovatelná	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná, jednotlivě v blistru	sterilní	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná, s ochranou proti světlu	-	64 / 512

Urine Monovette® s kyselinou boritou - se stabilizátorem pro mikrobiologická vyšetření

Objednáací č.	Objem	D x Ø	Provedení (zelená)	Čistota	Balení (vnitřní karton/vnější karton)
10.256*	3,2 ml	75 x 13 mm	Plastová etiketa, průhledná	-	64 / 512
10.256.020*	3,2 ml	75 x 13 mm	Plastová etiketa, průhledná, jednotlivě v blistru	sterilní	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Papírová etiketa, popisovatelná	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná, jednotlivě v blistru	sterilní	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Plastová etiketa, průhledná, jednotlivě v blistru	sterilní	100 / 500

Další spotřební materiál pro preanalýzu moči naleznete na www.sarstedt.com

*Plánované uvedení nového produktu 1. čtvrtletí 2024

SARSTEDT spol. s r.o.

Pod Pekárkami 338/12

190 00 Praha 9

Tel.: +420 281 021 491

Fax: +420 281 021 495

info.cz@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Další informace,
videa a objednání vzorku:
sarstedt.com/nft-cz

Máte-li jakékoli dotazy:
Rádi vám pomůžeme!

Navštivte rovněž naše internetové stránky: www.sarstedt.com