

Suave com os animais

Bom para o animal,
perfeito para sua prática!



Pré-analítico

Tratando bem os animais

Seguro. Econômico. Higiênico.

Como empresa inovadora com décadas de experiência em pré-análise humana, a SARSTEDT oferece uma variedade de soluções que também provaram ser eficientes na medicina veterinária e que dão ênfase à higiene, facilidade de uso e ao bem-estar do animal.

Com os tubos de coleta de sangue da linha S-Monovette®, definimos padrões de higiene para coleta fechada de sangue venoso em animais domésticos, como cães e gatos. Oferecemos também, soluções adequadas para coleta de amostra para necessidades específicas em pequenos pacientes, como pequenos mamíferos, pássaros ou répteis.

Teste nossos sofisticados sistemas e comprove as inúmeras vantagens práticas para seu trabalho diário.

Coleta de sangue em animais com a SARSTEDT.
Bom para o animal, perfeito para sua prática.

Pré-análise pela SARSTEDT

A grande vantagem da coleta de sangue com um S-Monovette® é que o sangue pode ser coletado diretamente no recipiente de amostra apropriado.

Nenhuma seringa descartável adicional é necessária para transferir a amostra de sangue para outros tubos. Isto economiza recursos e torna a coleta de sangue mais segura e higiênica do que opções alternativas de coleta de sangue.

Embalagens de papelão mais sustentáveis também minimizam os custos de descarte e o volume de resíduos.

Para cada animal, a solução ideal: juntos em nome do bem-estar animal.

No seu consultório veterinário entram pacientes dos mais diversos tipos e que têm suas necessidades individuais. A SARSTEDT oferece soluções adequadas para a pré-análise na medicina veterinária.

- O S-Monovette®: coleta de sangue segura, econômica e higiênica em animais domésticos randes;
- O Multivette®: coleta de sangue simples e delicada em animais domésticos pequenos apenas através da pressão venosa;
- A microa-agulha: pegar cada gota de maneira segura também em animais especialmente sensíveis, por ex.: utilizando um microtubo de amostra ou um Microvette®;
- Muitos outros sistemas e produtos individuais úteis abrangendo toda a área de coleta de amostras de sangue, de urina e fecal.





Mais sobre o Cuidado da
Saúde do Animal na
SARSTEDT

[animalhealthcare.
sarstedt.com](http://animalhealthcare.sarstedt.com)




“Nós usamos S-Monovette® em cães grandes. Com ele, nós enchemos os tubos de amostra apenas com uma mão de maneira simples e limpa.”



“O uso da Agulha Multifly® é um grande alívio para mim. Uma vez puncionado, eu tenho tempo suficiente para encher os tubos de amostra necessários.”



“Nós chamamos o Multivette® de o ‘sugador’. Nós simplesmente o conectamos na agulha luer e conseguimos, assim, enquanto estamos na veia, encher também dois ou três tubos com sangue.”

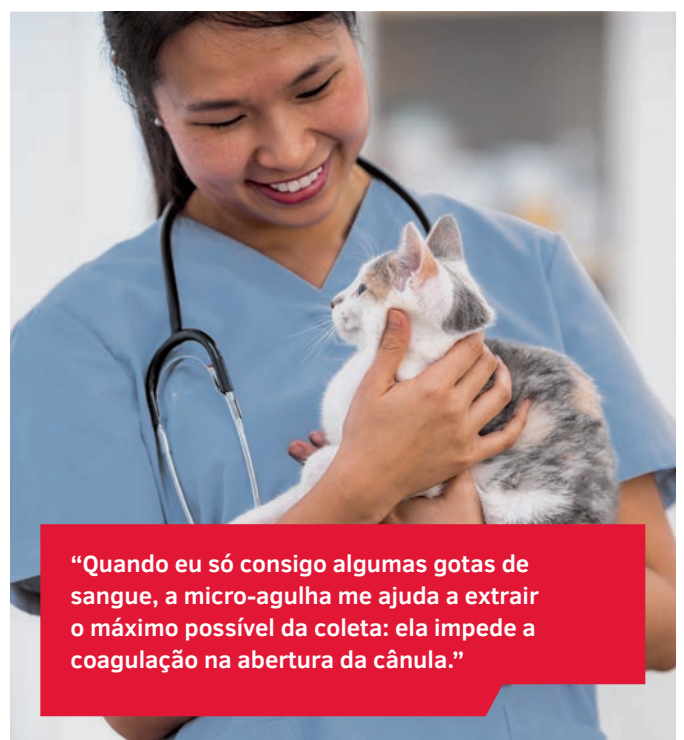

“Quando eu só consigo algumas gotas de sangue, a micro-agulha me ajuda a extrair o máximo possível da coleta: ela impede a coagulação na abertura da cânula.”

Coleta fechada de sangue venoso em animais grandes

O sistema dual do S-Monovette® permite uma coleta de sangue fechada, usando duas técnicas. A técnica de aspiração facilita a coleta de sangue ajustada ao fluxo sanguíneo, tornando-o mais suave. Para fluxos de sangue mais intensos, há alternativa de se utilizar a técnica de vácuo convencional.

O sistema de coleta de sangue sustentável

Comparado com tubos a vácuo comum, o S-Monovette® é um sistema mais sustentável.

O grande benefício do S-Monovette® é que você pode coletar diversas amostras em sequência sem precisar passar o sangue para outro tubo. O preparo desejado estará disponível em diversos S-Monovette®.


Os custos de descarte e o volume de resíduos são reduzidos graças ao design compacto dos produtos e à embalagem de papelão sustentável.


Além disso, cerca de um terço a menos de material é necessário para fabricar um S-Monovette® em comparação com um tubo a vácuo comercialmente comum.



Experimente agora gratuitamente!

[animalhealthcare.sarstedt.com](https://www.animalhealthcare.sarstedt.com)

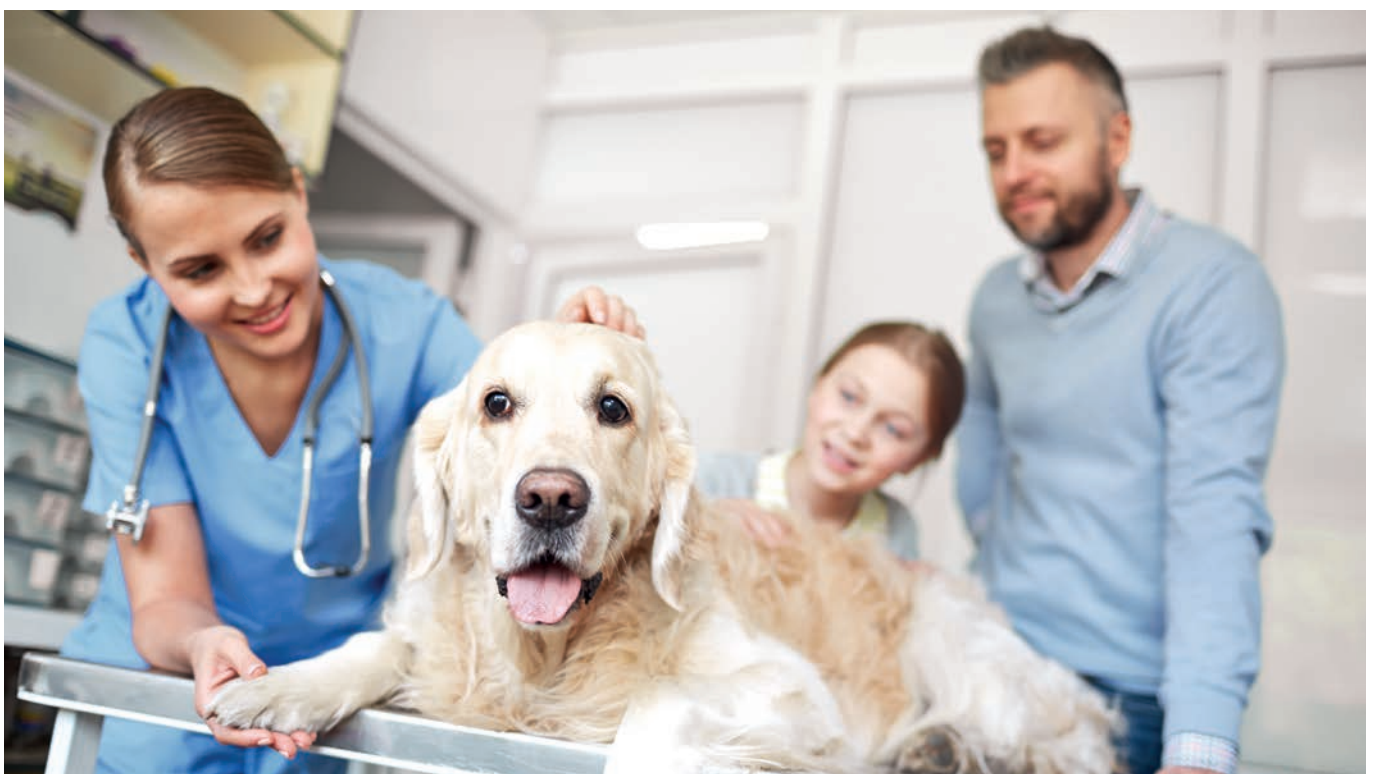

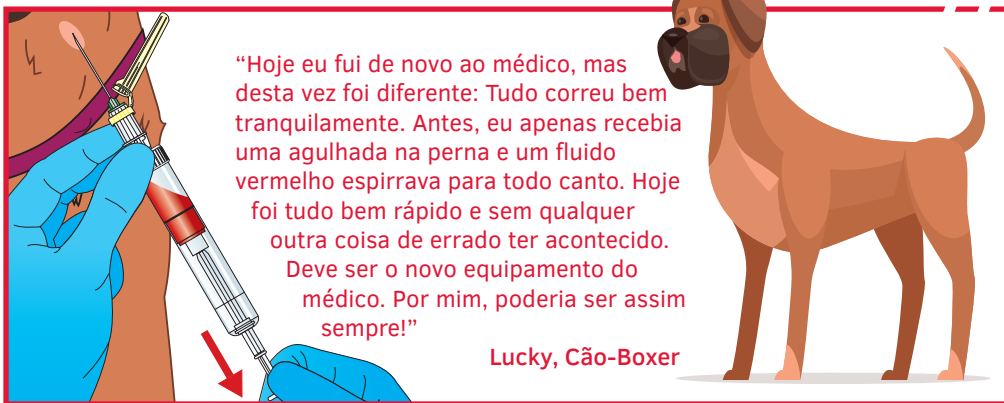

O S-Monovette®

Uma agulha de segurança operada com uma mão

Conexão segura e hermética com um adaptador pré-montado.

Durante a punção venosa bem-sucedida é possível a verificação do sangue dentro do S-Monovette® ou na cânula do Safety-Multifly®.


O S-Monovette® pode ser adquirido para quantidades de sangue de 1,2 a 4,5 ml em diversos preparações.

Coleta suave através da técnica de aspiração.



Além disso, o S-Monovette® também pode ser usado com Safety-Multifly®.

Coleta tranquila de sangue venoso em animais pequenos

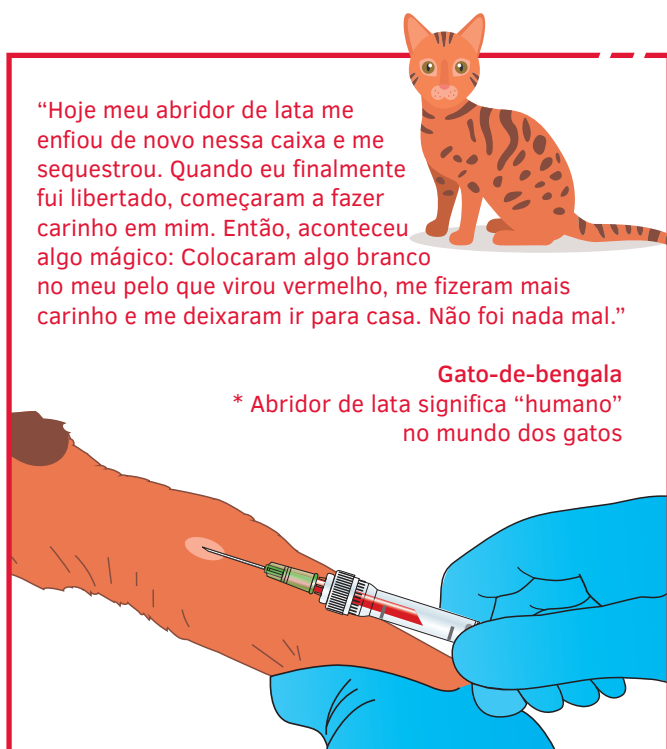


O Multivette® 600

O Multivette® 600 foi projetado e preparado para pequenas quantidades de sangue de 600 µl. A coleta é feita em uma condição quase fechada e utiliza pressão venosa natural. Isso faz com que a coleta seja especialmente simples e suave.

A coleta de amostra pode ser centrifugada diretamente no Multivette® 600. Isso facilita a coleta de sangue em pequenos animais e economiza tempo.

Devido ao diâmetro interno menor, a pipetagem após a centrifugação é extremamente fácil. Além disso, a amostra pode ser lacrada com segurança e enviada para o laboratório veterinário.

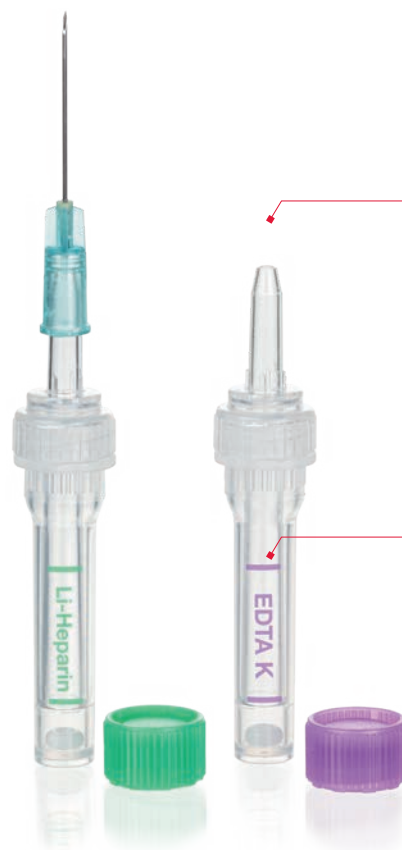

Diversas preparações para amostras de sangue de 600 µl

O tubo interno, com seu design especial, é auto preenchível devido à pressão venosa e ao efeito capilar.

Drenagem bem-sucedida em animais particularmente sensíveis

A micro-agulha com microtubos de amostra ou Microvette®

Particularmente em animais muito pequenos e veias difíceis, cada gota de sangue conta! A micro-agulha especial garante que cada gota de sangue flua para o tubo de amostra e não coagule previamente. O tubo de amostra adequado pode ser selecionado de acordo com o volume de amostra esperado.

Os microtubos são ideais para quantidades de 1,3 ml. Para pacientes menores, o Microvette® nos volumes de 100 µl a 500 µl é a escolha certa.



- Características de fluxo ideais
- Perda mínima de sangue sem volume residual no acessório
- O enchimento direto evita a perda de sangue em caso de transferência de recipiente
- Flexibilidade devido a diversos volumes e preparações



Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Mais informações e amostras
grátis para teste em:
animalhealthcare.sarstedt.com